

Γρήγορος Οδηγός

Σύνδεση των Pure Charge&Go BCT IX με υπολογιστή





Βήμα 1

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά σας - αυτό θα τα φέρει σε λειτουργία σύνδεσης για 3 λεπτά.

Σημείωση: Αν τα ακουστικά σας είναι ήδη συνδεδεμένα σε άλλη κοντινή συσκευή, απενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής εκείνης για όσο θα διαρκέσει η σύνδεση.


Βήμα 2

Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις του υπολογιστή σας επιλέγοντας το εικονίδιο των Windows στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

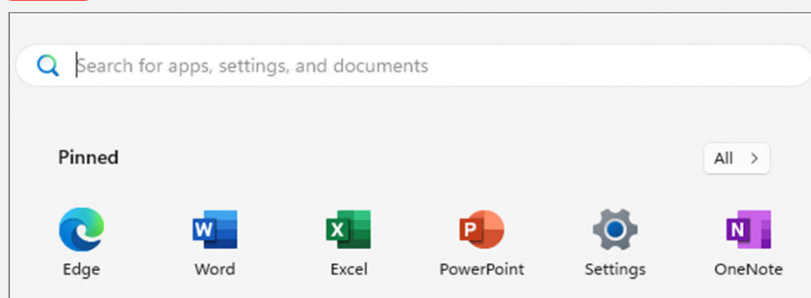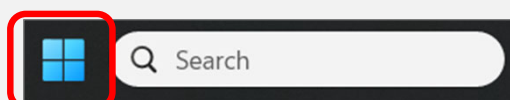


Βήμα 3

Στην αριστερή σειρά της οθόνης σας επιλέξτε Bluetooth και Συσκευές

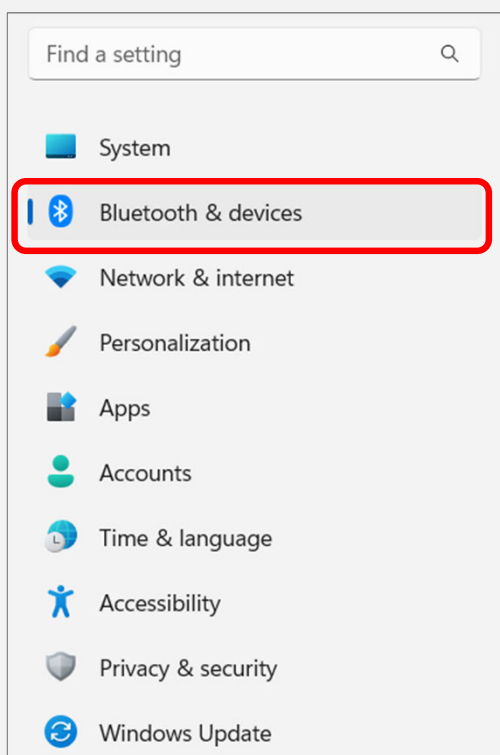

Βήμα 4

Σιγουρευτείτε πως η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και επιλέξτε Προσθήκη Συσκευής

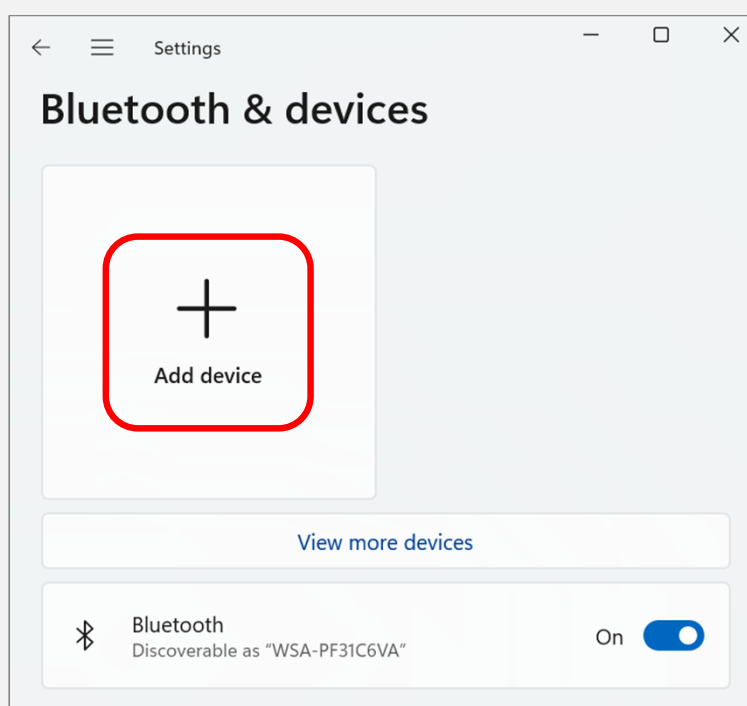

Βήμα 5

Επιλέξτε Bluetooth

Add a device

Choose the kind of device that you want to add.

-  **Bluetooth**
Audio devices, mice, keyboards, phones, pens, controllers, and more
-  **Wireless display or dock**
Wireless monitors, TVs or PCs that use Miracast or wireless docks
-  **Everything else**
Xbox controllers with Wireless Adaptor, DLNA and more

Βήμα 6

Ισως χρειαστεί λίγος παραπάνω χρόνος για να εμφανιστούν τα ακουστικά σας στην λίστα. Όταν αυτό συμβεί, επιλέξτε τα με το ποντίκι σας για να ολοκληρώσετε την σύνδεση.

Add a device

Add a device

Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.

-  **Anna's hearing aids**
Audio

Βήμα 7

Απολαύστε απευθείας streaming ήχου απο τον υπολογιστή στα Pure Charge&Go BCT IX ακουστικά σας.

Add a device

Your device is ready to go!

-  **Anna's hearing aids**
Connected mic, audio

Disconnect



Bluetooth®
Connectivity
Transformed

Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την WSAUD A/S γίνεται κατόπιν αδείας.