

Γρήγορος Οδηγός

Σύνδεση των Pure Charge&Go BCT IX με συσκευές iPhone



Τα ακουστικά σας διαθέτουν δύο τρόπους σύνδεσης με Bluetooth.

- Το Bluetooth® LE χρησιμοποιείται για να μπορείτε συνδέσετε το κάθε ακουστικό ξεχωριστά με το Signia app ώστε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις. Η σύνδεση γίνεται μέσω του Signia app.
- Το Bluetooth® Classic χρησιμοποιείται για να συνδέσετε ταυτόχρονα και τα δυο ακουστικά σας για streaming ήχου και κλήσεις. Η σύνδεση γίνεται μέσω του μενού Bluetooth.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Κατεβάστε το Signia app (έκδοση 2.7.0 ή μεταγενέστερη).



Βήμα 2


Σιγουρευτείτε πως το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο



Σημείωση: Αν τα ακουστικά σας είναι ήδη συνδεδεμένα με κάποια συσκευή που βρίσκεται κοντά σας, απενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής εκείνης κατά την διάρκεια σύνδεσης με την νέα.


Βήμα 3

Ανοίξτε το Signia app

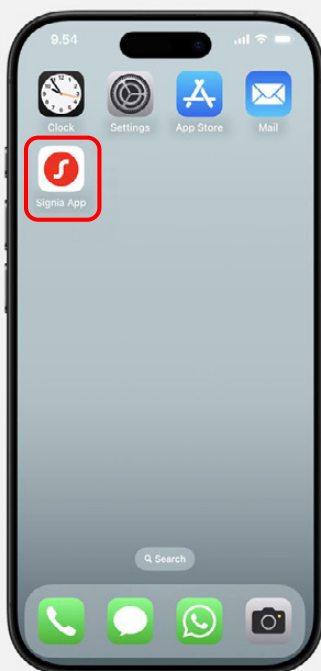


Βήμα 4

Επιλέξτε Bluetooth

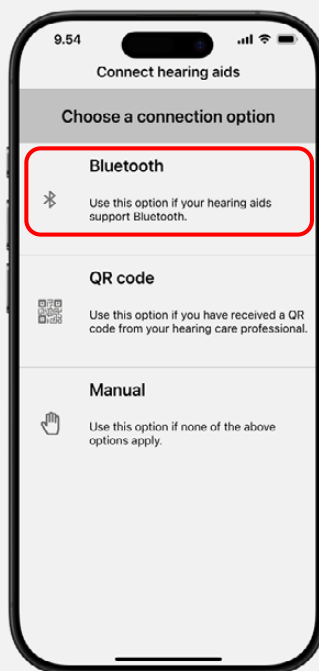


Βήμα 5

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας και ενεργοποιήστε τα ξανά για να γίνει η σύνδεση. Επιλέξτε OK.

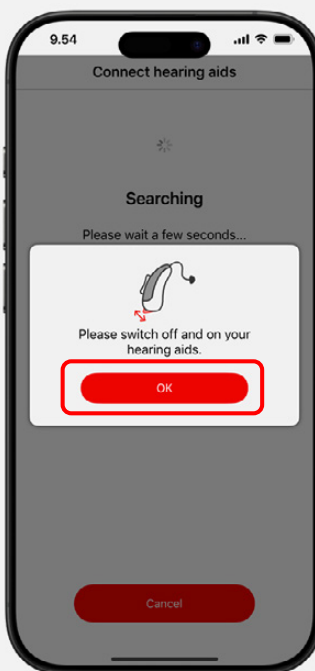


Βήμα 6

Όταν δείτε τα ακουστικά στην λίστα, πιέστε για να τα επιλέξετε.

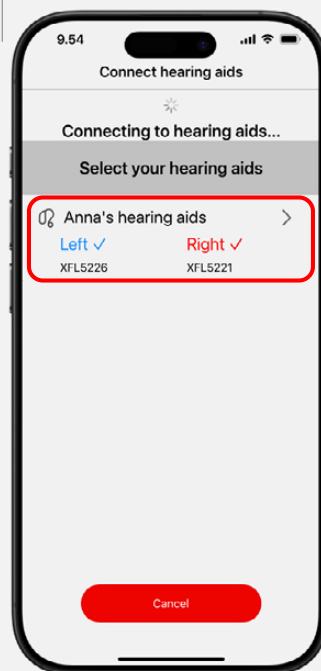

Βήμα 7

Στο αίτημα σύνδεσης επιλέξτε Σύνδεση. Αν συνδέετε 2 ακουστικά αυτό θα σας ζητηθεί 2 φορές.

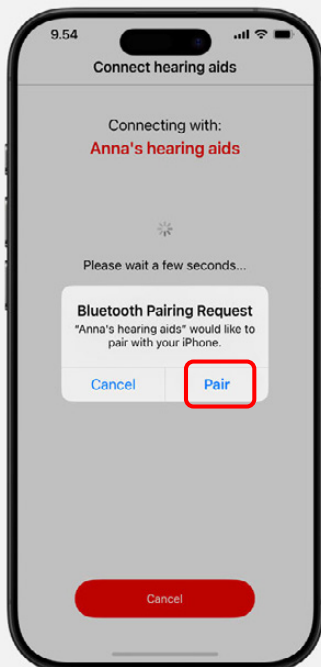

Βήμα 8

Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα με το Signia app.


Προχωρήστε με τα επόμενα βήματα ώστε να συνδεθείτε για streaming ήχου



Βήμα 9

Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεων και κατόπιν στο μενού Bluetooth.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης

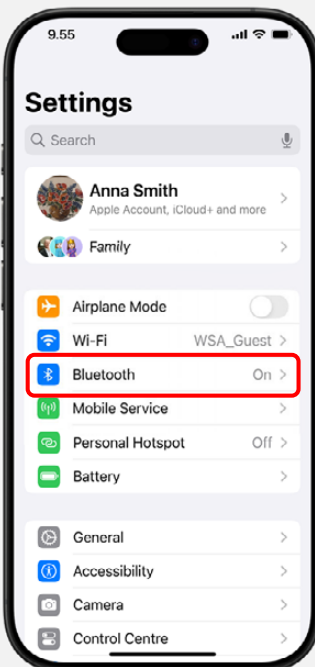

Βήμα 10


Στην λίστα θα βρείτε τα ακουστικά σας με την ένδειξη LE_.

Η ένδειξη αυτή αντιστοιχεί στα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα με το Signia app




Βήμα 11

Τα ακουστικά σας θα εμφανιστούν σε μια ακόμη λίστα με τίτλο Άλλες Συσκευές—πίστετε για να γίνει σύνδεση. Η σύνδεση αυτή αφορά το streaming.

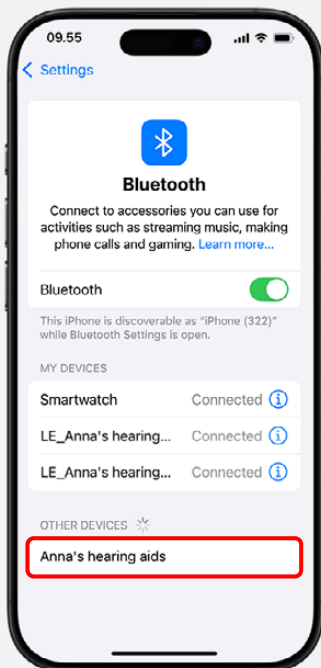


Βήμα 12

Για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις επιλέξτε το εικονίδιο ⓘ που θα βρείτε δίπλα από τα ακουστικά σας

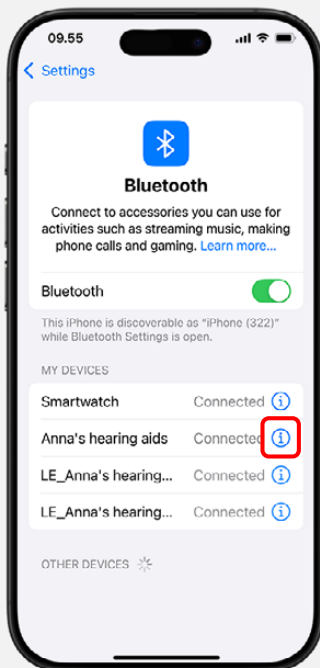

Βήμα 13

Στον πεδίο Τύπος Συσκευής πιάστε το βελάκι στα δεξιά και επιλέξτε από την λίστα Ακουστικά Βαρηκοίας.

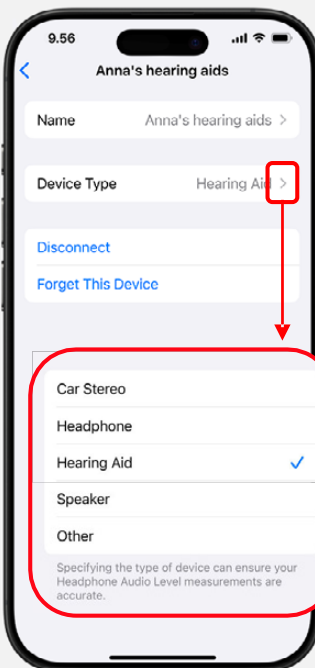

Βήμα 14

Σιγουρευτείτε πως τα ακουστικά σας είναι σωστά τοποθετημένα στα αυτιά. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε streaming απευθείας στα ακουστικά σας

